



智能艾灸仪使用说明书

型号: AS011-A02

感谢您的购买和使用。为给您带来最佳的使用体验，安装、使用和维护本产品前请您仔细阅读使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

产品注意事项

电源注意事项：

- ◆ 务必使用带可靠接地的三芯电源线插座。
- ◆ 如电源线、电源线插头、电源插座有损坏，请勿使用产品。
- ◆ 拔掉电源插头时，必须紧握插头而不要拉扯电源线，否则可能导致触电或者因短路引起火灾。
- ◆ 定期清除电源插头上的灰尘。
- ◆ 如电源线损坏，必须由制造商或专业维修人员更换。

使用中：

- ◆ 盖子及主体侧壁温度高，注意防烫伤；
- ◆ 请勿按压仪器臂以防机器倾倒。

清洁注意：


- ◆ 维修或清洁机器时，必须拔下电源插头，否则可能引起触电或因短路引起火灾。
- ◆ 清洁机器时请加以小心，请勿使用强腐蚀性的清洁剂进行清洗作业。
- ◆ 维修或清洁机器时，应等设备高温部位充分冷却再进行以防烫伤。
- ◆ 只能使用软布清洁本机器表面，否则本机可能会损坏或破裂。
- ◆ 禁止用酒精，有机溶剂擦拭否则会损伤产品或触电，发生伤害、火灾等。
- ◆ 清洁灰垢应动作应轻拿轻放，避免灰垢散落。

温馨提示：


- ◆ 使用本产品前，请仔细阅读本说明书，并请妥善保管，以备查阅。
- ◆ 此机不适合伤残人士、知觉障碍人士，智力障碍人士或儿童自行操作。

装箱清单及技术参数


产品结构：

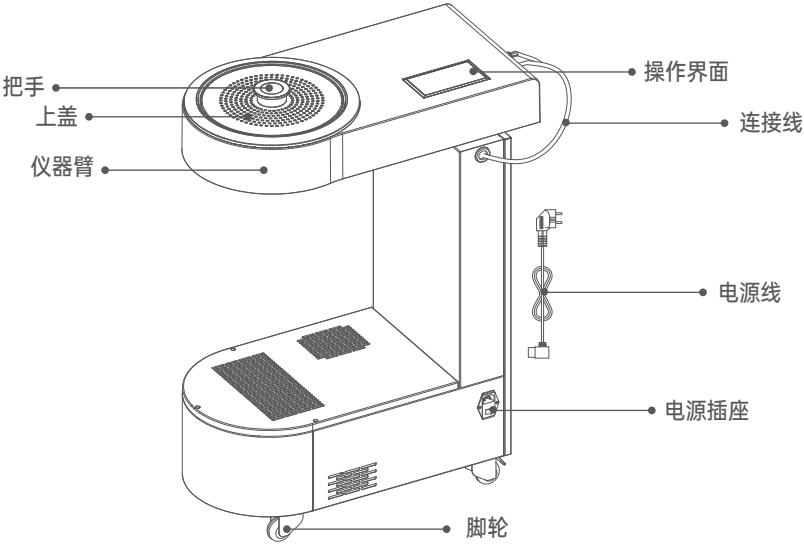

产品清单：

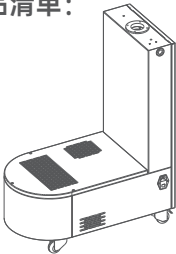

主机 (1台)

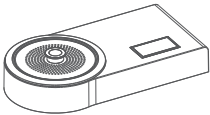


仪器臂 (1个)



电源线 (1条)



垫片 (1个)

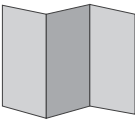


说明书 (1本)



遥控器 (1个)

产品使用说明

控制界面示意图：

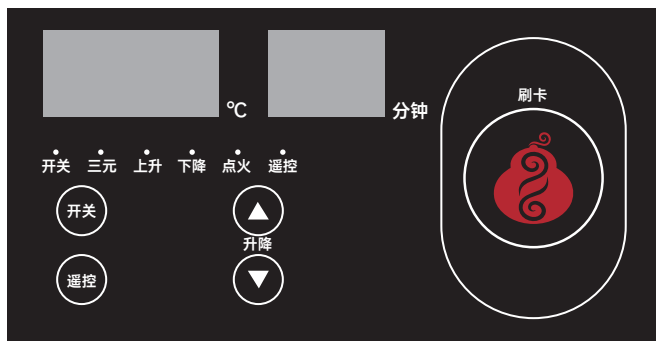

待机状态，按“开关”键开机。开机状态，按“开关”键关机。当刷卡后温度上升到460°C，“开关”键失效。当完成设定的工作时间，或是中途重新开/关总电源，“开关”键激活。



开机状态，按“遥控”键，遥控指示灯点亮，再按遥控器上的任何按键完成配对。



升降

开机状态，按住“上升”键，仪器臂上升，中途松开仪器臂停止，若一直按住则仪器臂上升到最高点后停止。



开机状态，按住“下降”键，仪器臂下降，中途松开仪器臂停止，若一直按住则仪器臂下降到最低点后停止。

产品使用说明



待机状态显示---，开机状态显示三元催化器实时温度。刷卡后显示剩余刷卡次数，5秒后切回显示温度。




待机状态显示--，开机状态显示默认的疗程时间。工作时，开始点火后进入倒计时，倒计时到0后重新进入待机状态。




刷卡区，刷卡成功滴一声短提示音后开机。刷卡不成功滴滴两声短提示音，不开机。

产品安装说明：

1、将尼龙垫片安装到仪器臂转轴，再将仪器臂安装到主体。

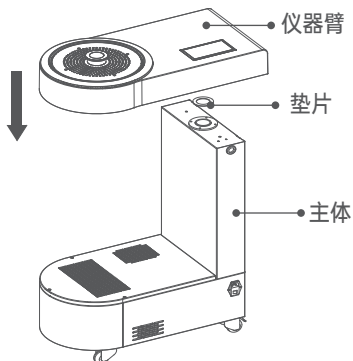


2、将主体的2根连接线与仪器臂连接。

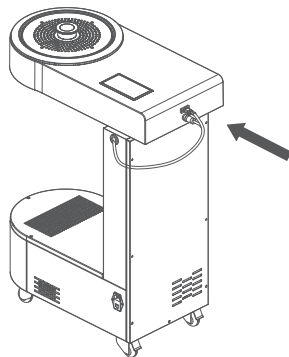


产品使用说明


1、将设备移动到合适位置并连接电源线。

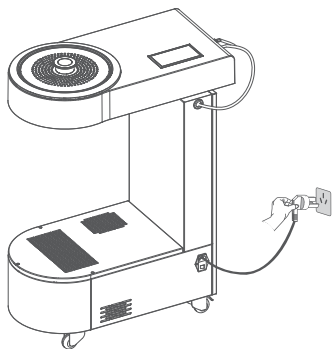

2、打开盖子，将艾条放到燃烧仓，然后盖好；

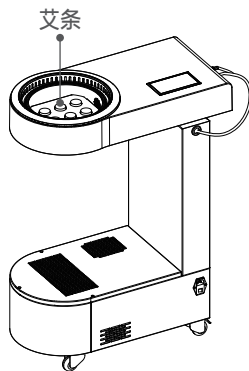

3、打开总电源，开机并将仪器臂工作区调整到施灸部位，再通过控制界面或遥控器调节到合适高度。

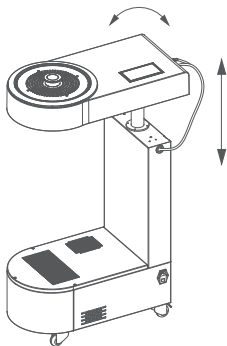

4、在控制界面刷卡区刷卡，开始进入艾灸工作（刷卡后，加热启动，温度达到460℃开始点火，进入疗程倒计时）；施灸过程可以根据灸感用遥控器自行调节高度。




产品使用说明

5、施灸完成后将艾条灰垢清除。打开盖子，将灰垢清理到下隔网，再逆时针旋转取下下隔网。

警告：a.工作时盖子及主体侧壁温度高，注意防烫。

b.清灰时艾条燃烧后产生高温，注意防烫，待冷却后再处理。

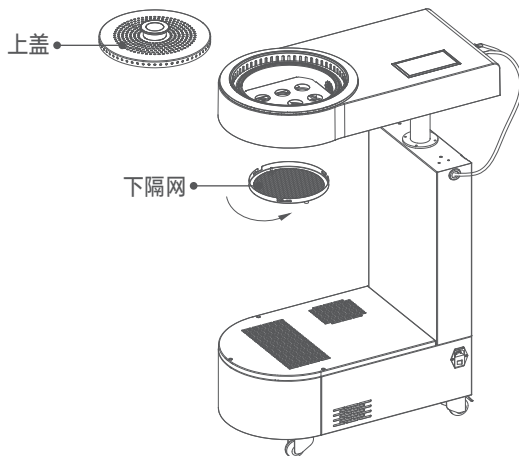

温馨提示：

- a. 刷卡才能启动加热功能，需刷卡机器才能进行艾灸工作。
- b. 刷卡后，当温度上升到 460°C 时，控制界面及遥控器的“开关”键失效，只有倒计时结束进入待机状态或是重新开/关总电源后才恢复。
- c. 艾灸工作时间为60分钟，从点火开始倒计时，计时结束后机器关闭，进入待机状态。
- d. 待机状态，循环风机及散热风机是一直启动的，以防止高温影响机器寿命。
- e. 每做完一个客户，在倒计时未结束时需要重新开/关总电源才能使用。
- f. 旋转仪器臂时注意避免连接线缠绕。

常见故障处理

如果您的设备运行不良，请在维修前检查下列各项：

故障状态	可能缘由	处理方法
机器不启动	a. 电源插头未安装 b. 未开启机器	a. 重新插好电源插头 b. 按“开关”开机
运转异常噪音	a.冷却风扇有异物.	a.关闭机器，取出异物
烟雾及气味大	温度未达到460℃	温控器温度达到460℃才能开始施灸工作
显示屏显示E0	温度探针开路	固定好连接线
显示屏显示E1	加热10分钟不能达到460℃	检查电源是否正常，电压是否偏低

 **警告：**若经过以上检查仍不能排除故障，请与我公司服务中心提供的维修网店或者技术服务中心联系，切勿自行拆卸维修，避免危险和对机器造成损坏。

技术参数

产品名称	智能艾灸仪
型号	AS011-A02
施灸方式	明火
艾条数量	6
遥控器	控制升降，开关机
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
产品尺寸	706(L)x347(W)x963(H)mm

有害物质成分及含量表

为满足《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求，以下提供的是电器产品部件名称以及可能含有的有害物质信息。

产品型号：AS011-A02		有害物质成份含量					
序号	部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
1	塑料件	○	○	○	○	○	○
2	PCB板	×	○	×	○	○	○
3	连接线	○	○	○	○	○	○
4	开关	×	○	×	○	○	○
5	电源线	○	○	○	○	○	○
6	电机	○	○	○	○	○	○
7	橡胶件	○	○	○	○	○	○
8	金属五金类	○	○	○	○	○	○
9	包材	○	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。							
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。							
 有害物质限制使用标志		环保使用期限10年: 表示本产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变，用户在产品使用书所述情况下正常使用本产品不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损害的期限。 箭头循环标志：表示本产品可回收利用。超过使用期限或经过维修无法正常工作后，不应被随意丢弃，请交由正规回收渠道以及有废弃电器电子产品处理资格的企业处理。正确的处理方法请查阅国家或当地有关旧电器电子品的处理规定。					

注意：以上标识均依据中国有害物质限制使用管理方法及其配套标准SJ/T11364要求执行。
本产品长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。

售后服务


售后服务权益

1. 按国家“三包”规定执行。
2. 本机器享受本公司售后服务中心的终生维护服务。
3. 下列情况不在“三包”范围：
 1. 因人为因素造成机器损坏。
 2. 因非本公司授权人员私自拆装修理造成损坏的。
 3. 使用过程中正常损耗及磨损。
 4. 未按照操作手册正确安装使用造成损坏。

注意事项

为了保障您的权益，敬请关注以下信息：

1. 在购机时，完整、正确和真实地填写您的售后服务卡，并且加盖销售商印章。
2. 请妥善保管已填写好并加盖销售商印章的售后服务卡用户联。
3. 有效的售后服务卡是实现您享受产品售后服务权益的基本保证。（有效的售后服务卡填写内容全面，真实，正确，无涂改痕迹）。
4. 产品不能为体力，感官或者精神能力有欠缺或缺少经验知识的人员（包括儿童）使用，除非他们有其他安全负责人员的监护下有提供有产品使用说明的情况下使用。

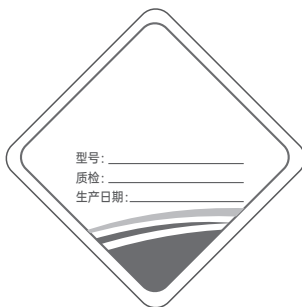

保修卡

产品名称：_____

产品型号：_____

产品颜色：_____

用户名称：_____

联系人：_____

联系电话：_____

客户地址：_____

购买地点：_____

购买日期：_____

以上内容请您填写完整，以便我们对您进行优质的服务。

全国服务热线：175-3773-6163

委托方：南阳市百岁葫芦商贸有限公司

地 址：河南省南阳市桐柏县安棚工业区

制造商：广州海科电子科技有限公司

生产基地：广东省清远市清城区广清产业园广拓街5号